

# Cannula oro-faringea



Tecnologie Biomedicali – Terapia Infusionale



## DESCRIZIONE GENERALE – MODALITA' D'USO

La cannula oro-faringea detta anche cannula di Guedel, è un presidio medico utilizzato per ripristinare e mantenere la pervietà delle vie aeree e serve principalmente ad evitare che la lingua del paziente vada ad ostruire il passaggio dell'aria verso i polmoni. Ne esistono di varie misure per permettere alla parte finale della cannula di posizionarsi esattamente tra le tonsille palatine. Per questo motivo queste cannule non vanno confuse con il tubo endotracheale usato nelle intubazioni che è un presidio di uso solo da parte di personale infermieristico e/o medico. La cannula va inserita solo e soltanto in pazienti incoscienti in quanto, se usata in pazienti coscienti, il paziente reagisce con l'espulsione della cannula, con connati di vomito e tosse. **Per introdurre la cannula è necessario innanzitutto scegliere la misura corretta. Si fa questo posizionando un lato della cannula sul lobo dell'orecchio del paziente. Quella di lunghezza corretta avrà l'altro lato esattamente all'angolo della bocca.** Aprire la bocca del paziente usando il pollice e l'indice della mano e inserire la cannula in bocca. Ruotare la cannula a 180° completando l'inserimento fino a che la parte piatta terminale della cannula non aderisce perfettamente alle labbra del paziente. Una volta inserita la cannula è possibile iniziare e/o continuare con la respirazione assistita preferibilmente con il pallone ambu nel caso il paziente non respiri autonomamente.

Nel caso di presenza di liquidi nel cavo orale, si può usare l'aspiratore inserendolo direttamente all'interno della cavità della cannula.

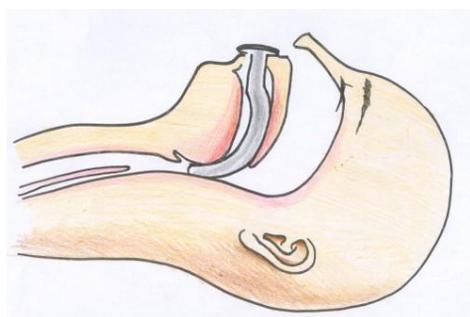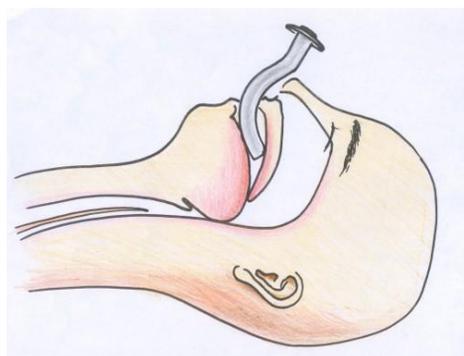

# Cannula oro-faringea

TIPO	CLASSE	CE	CND	REPERTORIO
Dispositivo medico	Is	0373	R010102	228568
CODICE	DESCRIZIONE			
Vedi tabelle	Si utilizza ogni volta che ci si trovi di fronte a soggetti in stato di incoscienza, sia in respiro spontaneo, sia in corso di ventilazione artificiale.			

## Guedel cannula

Misura	000	00	0	1	2	3	4	5
Colore	rosa	blu	nero	bianco	verde	giallo	rosso	arancione
Lunghezza (cm)	4	5	6	7	8	9	10	11
Codici	RN188	RN189	RN190	RN191	RN192	RN193	RN194	RN195

### Controlli

Controlli eseguiti:

Controllo qualità sia per i materiali che per i dispositivi. ISO 10993-7

Valutazione di biocompatibilità UNI EN ISO 10993-1

Citossicità ISO 10993-5

Emolisi ISO 10993-4

Tossicità sistemica acuta ISO 10993-11

Sensibilizzazione allergica ISO 10993-10

Compatibilità:

I materiali usati sono compatibili con farmaci e soluzioni infusionali.

Sterilità

Prodotto sterilizzato ad ETO validità del prodotto a 5 anni dalla data di sterilizzazione.

Non risterilizzabile.

Confezionamento


Box 10 unità per misura

Produttore:

ORLY GENERAL SUPPLY S.r.l.

v. Galileo Galilei n°47

41037 MIRANDOLA (MO)

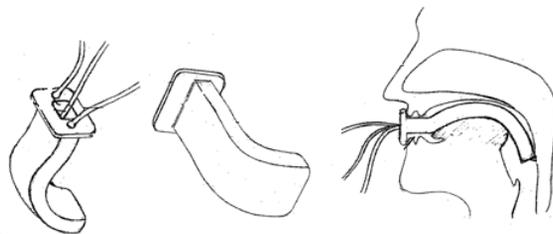

## Labelling Key

