

DIAL-MOVER

DISINCROSTANTE SPECIFICO PER MACCHINE DI DIALISI

DIAL-MOVER PLUS è un disincrostante pronto all'uso ad alta attività costituito da un associazione di acidi organici.

- 1. Composizione :** Miscela di acidi organici (ACIDO CITRICO ed ACIDO GLICOLICO)
Acqua depurata

- 2. Caratteristiche:** DIAL-MOVER PLUS è un'associazione di acidi organici in grado di sviluppare un'elevata attività disincrostante. Non dà luogo ad esalazioni ed odori particolarmente sgradevoli garantendo così una maggiore tollerabilità per gli operatori rispetto all'acido acetico.

- 3. Indicazioni d'uso:** disincrostante destinato alla rimozione delle incrostazioni, in particolare delle sedimentazioni calcaree, dai circuiti interni della apparecchiature per dialisi.
Prodotto ad uso professionale.

- 4. Modalità d'uso e tempi di contatto:** DIAL-MOVER è un prodotto pronto all'uso. La disincrostazione dei circuiti della macchina viene effettuata prima della procedura di disinfezione. **Provvedere all'aspirazione del prodotto da parte della macchina secondo i normali programmi automatici di decalcificazione e mantenendo i tempi di contatto prestabiliti dallo stesso.**

- 5. Avvertenze :**
(R) Frasi di rischio: R35 Provoca gravi ustioni
(S) Consigli di prudenza: (25) Evitare il contatto con gli occhi **(26)** In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico **(36/37/39)** Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia **(45)** In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico – mostrargli l'etichetta **(60)** Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi **(64)** In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente)

- 6. Sicurezza:** Classificazione ai fini della disciplina che regola la commercializzazione dei preparati pericolosi; corrosivo. Provoca ustioni

- 7. Conservazione :** Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, tenuta tassativamente chiusa, ed in ambiente fresco, pulito, asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta.
Non stivare il disincrostante insieme ad altri prodotti.

- 8. Smaltimento :** Rifiuto pericoloso. Non smaltire direttamente in fogna; smaltire il contenuto in osservanza alle disposizioni locali e nazionali con riferimento ai limiti per il pH. Contenitore in polietilene, non disperdere nell'ambiente dopo l'utilizzo.

- 9. Scadenza:** 36 mesi

- 10. Confezioni:** Flacons da ml 5000

- 11. Fabbriato da:** Lombarda H s.r.l. – Località Faustina – 20080 Albairate (MI)

Dispositivo Medico di Classe I

Rev. 06/2012