



SCHEDA TECNICA

"LH SALVIETTE"

CND D099 REPERTORIO 63571

Disinfezioni dello studio odontoiatrico e poliambulatori medici.

6. Modalità e Istruzioni per l'uso

Modalità d'uso

Per una disinfezione di emergenza passare la salvietta sulle superfici e sui dispositivi medici prima dell'uso.

7. Sicurezza

Consultare la Scheda di Sicurezza.

8. Tossicità

Tossicità acuta

Didecil-dimetilammonio cloruro

LD₅₀ orale , ratto : > 134 mg/kg

LD₅₀ dermica ,coniglio: > 1280 mg/kg

o-fenil-fenolo

LD₅₀ orale, ratto: ca. 2980 mg/Kg

LD₅₀ cutaneo, ratto: sup. 2000 mg/Kg

9. Controllo Qualità

Il prodotto possiede requisiti di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001:00 / UNI CEI EN 13485

10. Avvertenze:

Simboli:



irritante

Fraresi di rischio: (R36/38) Irritante per la pelle e per gli occhi.

Consigli di prudenza: (S2) Conservare fuori della portata dei bambini – **(S26)** In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico – **(S46)** In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Avvertenze: Non ingerire - Non impiegare contemporaneamente a saponi o tensioattivi anionici - Non disperdere le salviette ed il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

11. Conservazione e validità

Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Il periodo di validità indicato (30 mesi) si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.

12. Smaltimento

Effettuare lo smaltimento in conformità alla normativa sui reflui, tenuto conto di quanto riportato in composizione. Rifiuto non pericoloso.



SCHEDA TECNICA
"LH SALVIETTE"
CND D099 REPERTORIO 63571

13. Confezioni:


Contenitore con tappo protettivo da 72 salviette

14. Responsabile della immissione in commercio

Lombarda H S.r.l. Loc. Faustina, 20080 Albairate (MI).

15. Fabbricante

Lombarda H S.r.l. Loc. Faustina, 20080 Albairate (MI). tel. 02/94920509

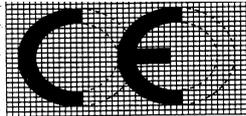

0373